

AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™

Karta dopasowania oddychających soczewek
AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™ z Dk/t 175

Przebieg wizyty

Wywiad – refrakcja – badanie
w lampie – keratometria

Wybór parametrów soczewki próbnej

Założenie soczewki próbnej

Pierwsza ocena dopasowania

Test tolerancji (15-30 minut)

Ocena dopasowania soczewki próbnej

Sprawdzenie mocy (nadkorekcja)

Przygotowanie soczewki

Zalecany tryb noszenia i okres próbny

Wybór środków pielęgnacyjnych

Regularne wizyty kontrolne,
pierwsza po 30 dniach,
następne co 3-6 miesięcyZakres aplikacji
oddychających
soczewek
AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™Nowe dopasowanie
AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™Najlepsza sferyczna korekcja okularowa
po przeliczeniu na płaszczyznę rogówki,
Vd=0 mm.

Dopasowanie możemy rozpocząć od krzywizny 8,4

Przed założeniem przepłucz soczewkę płynem do pielęgnacji (np. SOLOCARE AQUA™).
Pełen komfort tuż po założeniu soczewek lub po krótkim okresie adaptacji.

Dopasowanie zbyt ciasne - zmień soczewkę na AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™, BC 8,6

W związku z asferyczną konstrukcją może wystąpić konieczność zmiany mocy o 0,25
lub 0,50 dpt w kierunku plus lub minus odpowiednio dla mocy dodatnich i ujemnych


Każdą nową soczewkę AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™ przepłucz przed założeniem (SOLOCARE AQUA™)

Zawsze zaczyna się od tygodnia w trybie dziennym, następnie można przejść do trybu ciągłego*

Stosownie do potrzeb pacjenta zalecany SOLOCARE AQUA™ lub AOSEPT® PLUS.

Zmiana soczewek na
AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™W związku z asferyczną konstrukcją może
wystąpić konieczność zmiany mocy o 0,25
lub 0,50 dpt w kierunku plus lub minus
odpowiednio dla mocy dodatnich i ujemnych

*Ciągłe noszenie do 30 dni i nocy bez zdejmowania

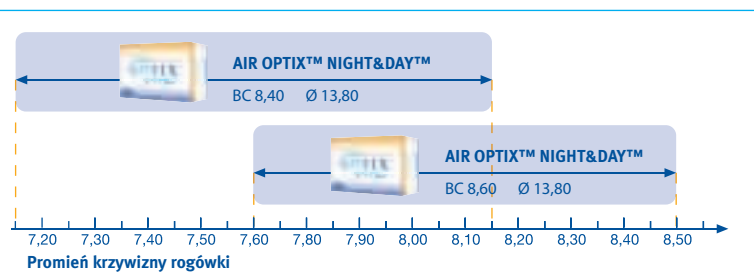

Zalecany tryb noszenia i wymiany soczewek AIR OPTIX™ NIGHT&DAY™:

- Bez ograniczeń w ciągu dnia z codzienną pielęgnacją. Soczewki wyrzucamy po miesiącu od otwarcia blistrów.
- Okazjonalne spanie w soczewkach z pielęgnacją po zdjęciu. Soczewki wyrzucamy po miesiącu od otwarcia blistrów.
- Ciągłe noszenie do 30 dni i nocy z pielęgnacją w przypadku ich zdjęcia. Soczewki wyrzucamy po miesiącu od otwarcia blistrów.